

# GenBody Ehrlichia canis Ab test (Ehrlichia Canis Ab test)


Η **ερλιχίωση** είναι μια σοβαρή ασθένεια του σκύλου, με πολύ συχνή εμφάνιση στη χώρα μας, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Προκαλείται από το ενδοκυτταρικό βακτήριο **Ehrlichia canis** και μεταδίδεται από ορισμένα είδη κροτώνων (τσιμπούρια) τα οποία μεταδίδουν την ασθένεια από ένα μολυσμένο σκύλο σε έναν υγιή σκύλο.

Η ερλιχίωση προσβάλλει συχνότερα τους σκύλους αλλά και άλλα είδη κυνιδών (Canidae) Προκαλεί πυρετό, λήθαργο, απώλεια βάρους, λεμφαδενοπάθεια, ρινικές και οφθαλμικές εκκρίσεις, οίδημα των προσαγωγών και κρίσεις επιληψίας.

Το κύριο είδος κρότωνα (τσιμπούρι) μέσω του οποίου μεταδίδεται η Ehrlichia canis ονομάζεται Rhipicephalus Sanguineus. Έως σήμερα δεν υπάρχει κάποια ένδειξη για άμεση μετάδοση της νόσου από το σκύλο και τη γάτα στον άνθρωπο ή σε άλλα ζώα.

Τα τσιμπούρια Rhipicephalus Sanguineus μπορούν να μολύνουν υγιείς σκύλους, ακόμη και 4-5 μήνες μετά την αποκόλληση τους από ένα μολυσμένο σκύλο.

Έτσι, όταν υπάρχουν οι κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες (θερμό κλίμα), οι υγιείς σκύλοι κινδυνεύουν να προσβληθούν ακόμη και για όλο τη διάρκεια του έτους.

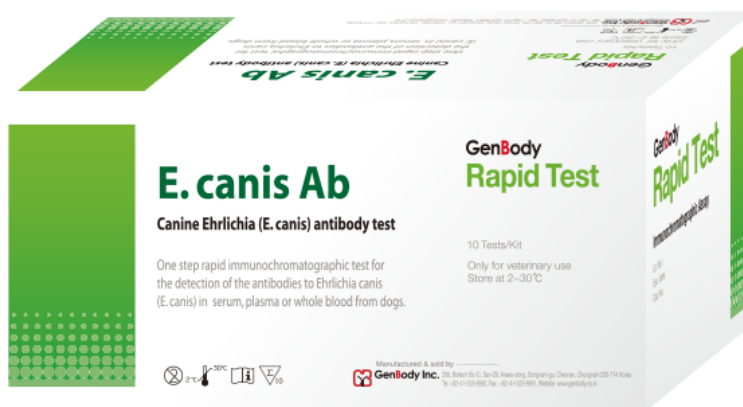

Το διαγνωστικό τεστ **GenBody E. canis (Ehrlichia canis) Ab test** ανιχνεύει αντισώματα κατά Ehrlichia canis σε δείγμα ορού, πλάσματος ή ολικού αίματος σκύλου.


GB\_ECAAB010: Διαγνωστικό τεστ GenBody E. canis (Ehrlichia canis) Ab

❖ Ευαισθησία: 98.0% (vs. IFA) (*)	❖ Συσκευασία: κουτί των 10 τεστ
❖ Ειδικότητα: 98.8% (vs. IFA) (*)	❖ Διάρκεια ζωής: 24 μήνες εκτός ψυγείου


(\*) IFA = Ανοσοφθορισμός

Η συσκευασία περιέχει: δέκα (10) συσκευές της δοκιμής GenBody E. canis (Ehrlichia canis) Ab, ανεξάρτητα συσκευασμένες, φιαλίδιο με ρυθμιστικό διάλυμα (assay solution), τριχοειδείς σωλήνες μίας χρήσης των 10μℓ και εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.

**Διαδικασία πραγματοποίησης της δοκιμής GenBody E. canis (Ehrlichia canis) Ab**  
Τοποθετείστε στη συσκευή μία σταγόνα (10μl) δείγματος και τρεις σταγόνες ρυθμιστικού διαλύματος (assay solution). Περιμένετε δέκα (10) με δεκαπέντε (15) λεπτά το πολύ, για να διαβάσετε το αποτέλεσμα.

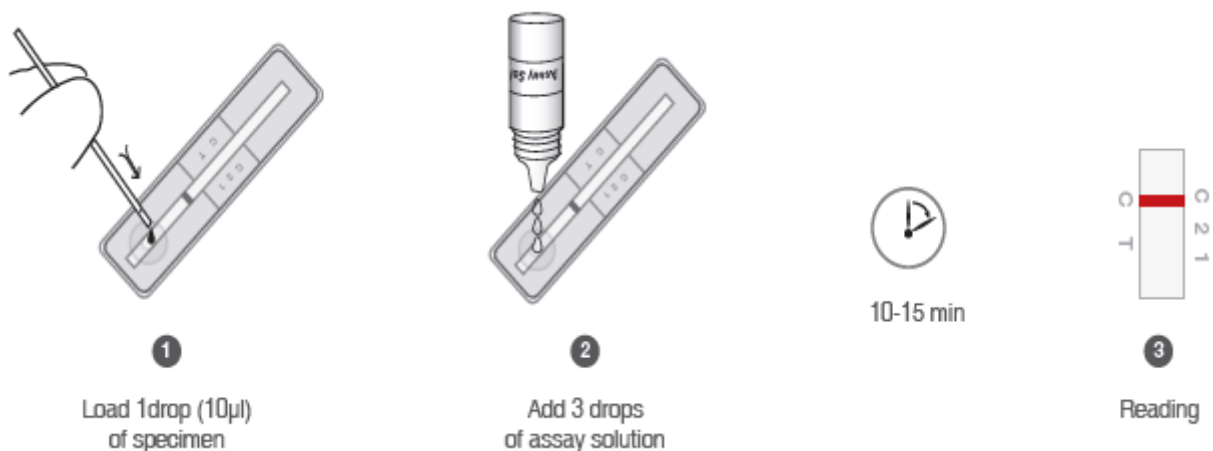

### Ερμηνεία των αποτελεσμάτων

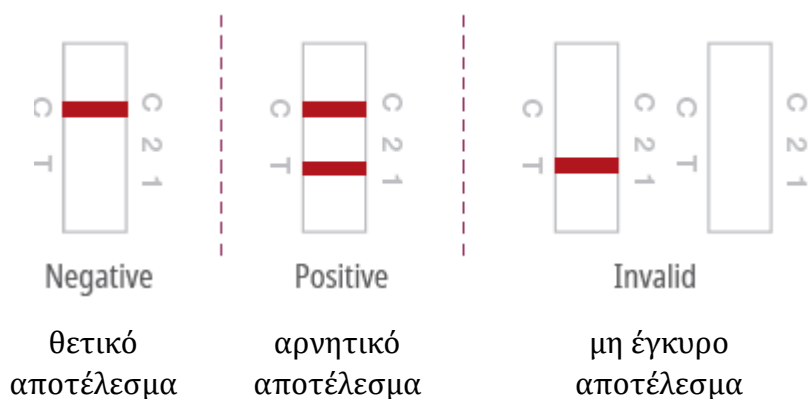

### Ποσοτικό αποτέλεσμα


Μπορείτε να λάβετε τίτλο αντισωμάτων στην περίπτωση που έχετε στην κατοχή σας τον αναλυτή ανάγνωσης των διαγνωστικών τεστ GenBody, **Confiscope G20V**



## Δείγμα στο οποίο πραγματοποιείται η δοκιμή

Ορός, πλάσμα ή ολικό αίμα

Whole blood

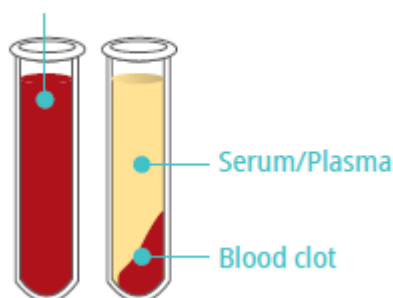

### Λίγα ακόμα για την ερλιχίωση

Ο χρόνος επώασης ποικίλει από μια έως τρεις εβδομάδες. Υπάρχουν η οξεία, η υποξεία και η χρόνια μορφή της νόσου αν και συχνά, τα όρια μεταξύ τους είναι δυσδιάκριτα.

Τα κύρια συμπτώματα μπορεί να είναι πολλά: αδυναμία, πυρετός, καταβολή δυνάμεων, ίκτερος, αιμορραγική διάθεση (αιματουρία, ρινορραγία, επίσταξη, ουλορραγία, μέλαινα).

Εργαστηριακά: συχνά υπάρχει αναιμία, θρομβοκυτταροπενία υπερπρωτεϊναιμία, υπερσφαιριαιμία κ.ά.

### Τιμοκατάλογος

τιμή συσκευασίας (€)	Τεμάχια ανά συσκευασία	τιμή ανά τεστ (€)
60,00	10	6,00

**GenBody**

Veterinary Diagnostics



**GenBody Inc.**

CHANGE AND INNOVATION